

Conseils d'utilisation

du système de stabilisation du sein SmartCurve™

Le système de stabilisation du sein SmartCurve™ a été conçu pour assurer un meilleur confort aux patientes permettant une mammographie personnalisée sans compromettre la qualité de l'image¹.



SmartCurve™


Les palettes de dépistage de routine sans cadre sont fournies avec le système de mammographie 3Dimensions™




Palette SmartCurve™ 18 x 24 cm




Palette SmartCurve™ 24 x 29 cm

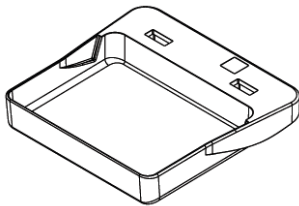

Palette plate standard 18 x 24 cm

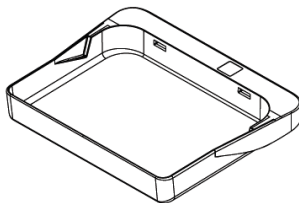

Palette plate standard 24 x 29 cm

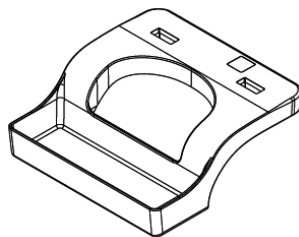

Palette pour petits seins

Les palettes SmartCurve™ s'adaptent à la majorité des tailles de sein et vous pouvez les utiliser de la même manière que les palettes plates standard, en tenant compte de quelques points :

- ✓ Nous vous recommandons de choisir la taille appropriée de la palette SmartCurve™ ou la palette plate standard en évaluant la taille de la poitrine de chaque patiente et l'épaisseur de la compression mammaire :
 - Les palettes SmartCurve™ peuvent ne pas convenir aux patientes ayant une très petite poitrine. Pour ces patientes, utilisez les palettes pour petits seins.
 - Pour les patientes ayant des seins très minces ou plats, les palettes SmartCurve™ peuvent ne pas être le meilleur choix. Dans ces cas, utilisez les palettes plates standard.
 - En raison de la forme incurvée des palettes, la plus grande taille de palette SmartCurve™ de 24 x 29 cm est plus adaptée aux patientes qui seraient généralement imagées avec la plus petite taille de palette plate standard de 18 x 24 cm.
- ✓ Lorsque vous installez la patiente et la palette SmartCurve™, placez votre main et votre bras parallèlement à la paroi thoracique de la patiente. Comprimez doucement et progressivement afin de rendre l'expérience plus confortable pour la patiente et d'aider à contrôler la main pendant le positionnement. La compression appropriée sera atteinte plus tôt en raison de la forme de la palette.
- ✓ En règle générale, lorsque les palettes SmartCurve™ ne sont pas adaptées, nous vous conseillons d'utiliser plutôt les palettes plates standard, qui sont toujours fournies avec le système 3Dimensions™.

Remarque :

- ! N'utilisez pas les palettes SmartCurve™ dans les vues en décolleté, en roulée ou en mosaïque de très gros seins. Dans ces cas, utilisez les palettes plates standard.
- ! Les palettes SmartCurve™ ne sont pas compatibles avec le mode de compression FAST.

1. Données sur fichiers : DHM-06039 Clinical Report Summary (Résumé du rapport clinique) (2017).