


Fluent[®]Pro

Système de gestion des fluides

La nouvelle génération de systèmes de gestion des fluides


Le système Fluent Pro a été conçu pour optimiser votre expérience de l'hystérocopie MyoSure en augmentant l'efficacité, la confiance et les performances dans votre bloc opératoire et votre centre ambulatoire.

AMÉLIORATION DE L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR

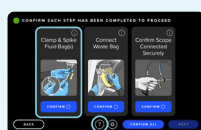


Interface utilisateur guidée

Une configuration guidée et des écrans d'aide intégrés sont disponibles à chaque étape de la procédure.

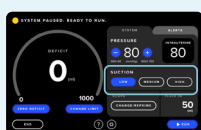

Contrôle réglable de l'aspiration

Choisissez parmi trois niveaux d'aspiration : faible, moyenne, élevée.

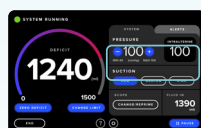

Affichage de la pression intra-utérine

Surveillance du point de consigne et de la pression intra-utérine en temps réel au cours d'une procédure.



Données récapitulatives de la procédure

Le déficit final, le volume d'entrée de liquide et le temps de coupe s'affichent sur l'écran récapitulatif après la procédure et sont accessibles depuis l'écran de démarrage de la dernière procédure.

SIMPLIFICATION DU FLUX DE TRAVAIL



Leviers de rétention Easy Eject[™]

Les leviers de rétention Easy Eject maintiennent les produits jetables en place pendant l'utilisation et permettent de les retirer facilement après utilisation.



Système sans réservoir

Le sac à déchets jetable et les cartouches FloPak[™] éliminent le besoin de désinfecter et de remplacer les réservoirs.



Conception du collecteur de tissus

La conception de l'attache et du panier facilite le processus lors du retrait ou du remplacement de la poche à tissus, empêchant le refoulement de liquides.



Compartiment encastré pour sac à déchets

Le sac à déchets protégé est conçu pour éviter les interactions involontaires et minimiser les interruptions pendant les interventions.




Composants du système

AVANT

- 1 Crochets des poches de liquide
- 2 Moniteur à écran tactile
- 3 Poignée
- 4 Levier In-FloPak
- 5 Levier Out-FloPak
- 6 Panneau TRD MyoSure
- 7 Crochets des sacs à déchets
- 8 Compartiment des sacs à déchets
- 9 Roulette
- 10 Verrouillage des roulettes

ARRIÈRE

- 11 Potence pour intraveineuse
- 12 Bouton d'alimentation
- 13 Poignée
- 14 Panier à accessoires
- 15 Port du cordon d'alimentation
- 16 Cordon d'alimentation
- 17 Enroulement du cordon
- 18 Pédale
- 19 Panier à pédale

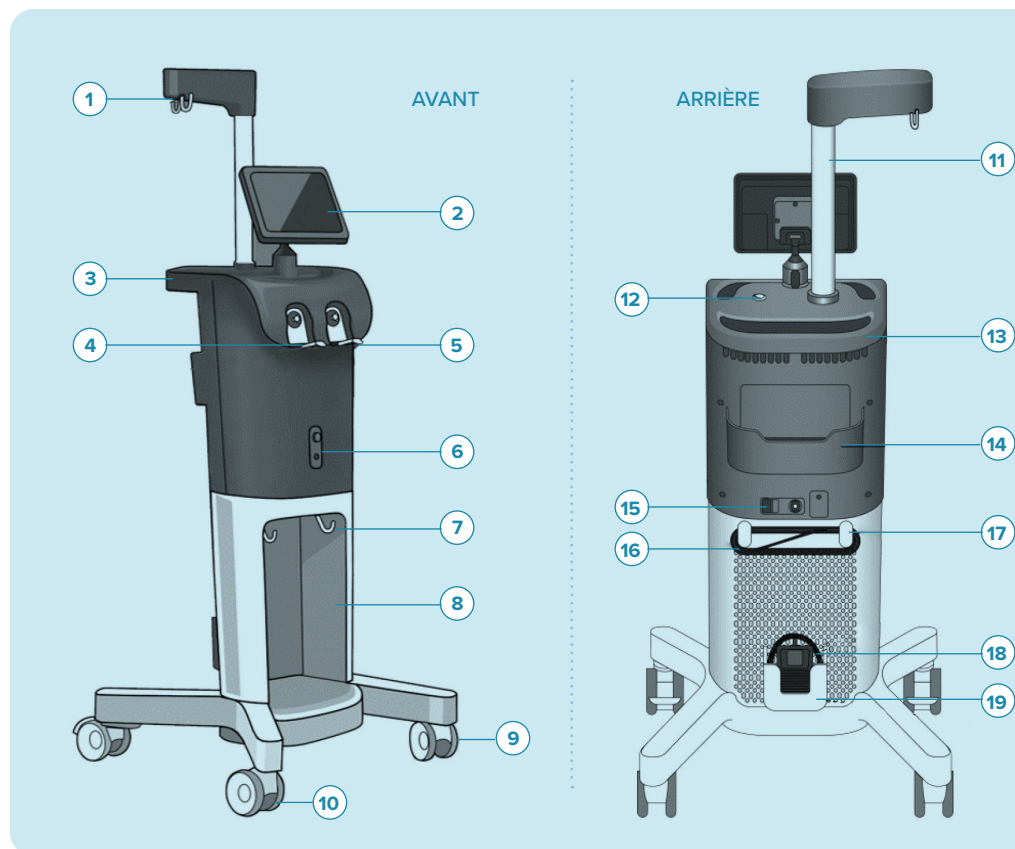

Renseignements pour les commandes

Description du produit	Numéro de produit	QTÉ
SYSTÈME		
Système de gestion des fluides Fluent Pro	FLT-200	1
ACCESSOIRES		
Sacs à déchets 6L	FLT-205	5/paquet
Poche à tissus	FLT-210	10/paquet
Trousses d'intervention	FLT-212	6/paquet
Poids à crochet en acier inoxydable de 500 g	MME-03095	1
Cordon d'alimentation Fluent Pro	MEL-01716	1

Caractéristiques techniques¹

Caractéristiques techniques de la trousse d'intervention jetable

Composants	Cartouche In-FloPak, cartouche Out-FloPak, sac à déchets, poche à tissus
Dimensions (boîte simple)	17,24" (L) x 15" (l) x 3,45" (P)
Mécanisme du Fluent Pro	
Poids du système	143,3 lb (65 kg)
Dimensions du système	27" (L) x 23" (l) x 67" (H)
Capacité maximale de la cellule de charge	13,8 lb (6,3 Kg)
Alimentation	
Désignation des fusibles	Fusibles T5AH, 250 V
Consommation électrique	350 W
Capacité maximale de la cellule de charge	100 à 240 VCA
Plage de fréquence d'alimentation	50 à 60 Hz
Conditions de fonctionnement	
Plage de température	14 à 30 °C (57 à 86 °F)
Humidité relative :	20 à 80 % (sans condensation)
Conditions de stockage	
Conditions de stockage et de transport	-30 à 60 °C (-22 à 140 °F)

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Hologic.

SS-01585-CAN-2201 Rév. 002 © 2024 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, Easy Eject®, Fluent®, MyoSure®, Omni®, SMARTFlo®, ainsi que The Science of Sure et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées à l'ensemble du corps médical exerçant aux États-Unis et dans d'autres pays, et ne doivent pas être interprétées comme une promotion ou une sollicitation de produits lorsque de telles activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusions en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour en savoir plus sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez communiquer avec votre représentant local de Hologic.